

ADVANTEC®

食塩含浸濾紙 ソルセイブ®

Salt-impregnated test paper SALSAVE®



ソルセイブ®

アドバンテック東洋株式会社

食塩含浸濾紙 ソルセイブ®

Salt-impregnated test paper SALSAVE®

減塩の参考として、塩からさの比較を簡単に確認できる濾紙です。

○味覚診断用の試験紙ではありません。

特長

- 減塩の参考として、食品の塩からさを簡単に比較確認できるよう一定量の食塩を濾紙に含浸、乾燥させた、食塩含浸濾紙です。
- 濾紙はRANGE 0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6の7種類が1セットになっています。
- 各々の濾紙を舌に乗せ、どのRANGEの濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
- 減塩の参考に使用するものです(味覚感度の診断用ではありません)。


仕様

| | |
|-------------------|------------------------|
| 品名 | ソルセイブ® |
| 商品コード | 07830010 |
| 商品構成 (1セットの内容) | RANGE 0 4瓶 (試験紙400枚) |
| | RANGE 0.6 1瓶 (試験紙100枚) |
| | RANGE 0.8 1瓶 (試験紙100枚) |
| | RANGE 1.0 1瓶 (試験紙100枚) |
| | RANGE 1.2 1瓶 (試験紙100枚) |
| | RANGE 1.4 1瓶 (試験紙100枚) |
| | RANGE 1.6 1瓶 (試験紙100枚) |
| 価格(税抜き) | ¥18,700 |

・補充用として各 RANGE のものを個別に販売しておりますので、ご照会ください。

使用方法

- ① 少し水を飲み、口を湿らせます。
- ② RANGE 0 の濾紙(以下ブランクという)を下の使用法図のように斜線部分を舌に乗せ、3秒後に取り出します(濾紙の味を確認)。
- ③ RANGE 0.6 の濾紙を同様に舌に乗せ、3秒間で何か味を感じるかをテストします。
- ④ 塩からい、しょっぱい、塩あじ、塩っぽいなどの答えが出るまで、RANGE 0.6 の濾紙から順に、RANGEの大きい濾紙をテストします。
- ⑤ 連続三段階のRANGEで答えが出ないときは、再度水で口をゆすぎ、再度ブランクを3秒間舌に乗せ、次のRANGEに移ります。

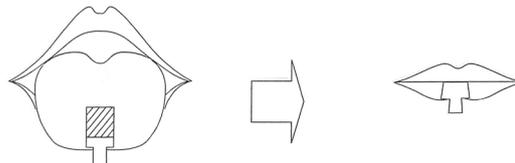

舌の先中央に
本品を乗せます。

軽く口を閉じ、3秒
たったら取り出します。

使用上の注意

- 味覚感度の診断用ではありません(減塩の参考として使用するものです)。
- チェック直前に味の濃いものを食べたときや、喫煙をしたときは、味覚が鈍感になっている可能性があるため、食後、もしくは喫煙後は、1時間以上経ってからご使用ください。
- チェック終了後、被験者は必ず口をゆすいでください。

参考文献

- 丸山千寿子ら「食塩味覚閾値判定濾紙の改良と減塩食事療法における評価」栄養学雑誌Vol. 46、No. 5、211から216(1988)
- 丸山千寿子ら「健常者及び高血圧患者の食塩味覚閾値について(第1報)」栄養学雑誌Vol. 48、No. 3、121から126(1990)
- 丸山千寿子ら「健常者及び高血圧患者の食塩味覚閾値について(第2報)」栄養学雑誌Vol. 48、No. 6、267から271(1990)

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所 盛岡

製造元 東洋濾紙株式会社

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- ADVANTEC は、東洋濾紙株式会社とそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- SALSAVE、ソルセイブは東洋濾紙株式会社の登録商標です。

107-T-02-23040